

# VISIÈRES de PROTECTION



Modèle RC2 original (agrée par le ministère de la santé Tchèque)

Matière PETG de préférence – Infill 30% - Pas de support – couche 0.3mm – Buse 0.4 mm - Skin 0.6mm – Pas de Raft – Temps d’impression 3h – Plateau 85°

Fichier 1 : covid19\_headband\_rc2


Fichier 2 : bottom\_reinforcement

Elastique à bouttonnière largeur 25mm



Visière : Plats de couverture transparents pour reliures 30/100mm (ou 20/100mm)

Plan de définition de la visière

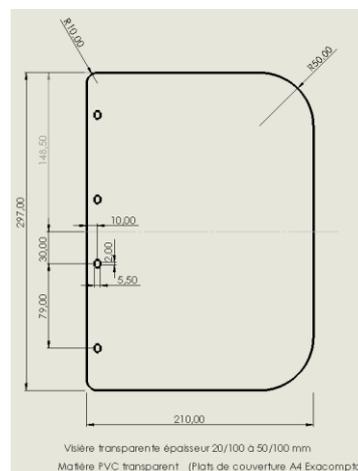

Rendre étanche le dessus du masque en collant du plastique transparent (pochette transparent ou feuille de rétro-projecteur) avec de la colle PVC ou de la super glue.

